

FICHE TECHNIQUE



Album test chromatique en planches adulte et pédiatrique

Permet la détection des déficiences de la vision des couleurs

Pour les tests en ophtalmologie et optométrie.

Permet la mise en évidence rapide et précise de la dyschromatopsie congénitale (rouge-vert).

Utilisation :

- Les planches sont à utiliser dans une pièce convenablement éclairée par la lumière du jour.
- Elles doivent être tenues à environ 70 cm du sujet et perpendiculairement à l'axe visuel.
- Le patient doit répondre en 3 secondes maximum.
- Il n'est pas toujours utile d'utiliser toutes les planches.

2 modèles disponibles :

- Test pédiatrique : 10 planches
- Test adulte : 15 planches

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.