



Applicateur de gouttes pour les yeux Ezidrops - Facile, rapide et sans douleur - Bleu ou Rouge

Le moyen le plus simple pour mettre des gouttes et collyres dans les yeux

L'applicateur oculaire EZIDROPS est un objet très simple et très efficace pour inoculer les gouttes dans l'œil.

Il est souvent compliqué de s'administrer des gouttes ou des collyres dans l'œil : avec l'applicateur oculaire EZIDROPS, la vision est occultée et ne voit pas entrer la goutte dans l'œil. Il y a donc une diminution du réflexe de clignement de l'œil. Il est très facile d'utilisation, s'adapte à presque tous les flacons avec embout et est sans douleur.

- Facile d'utilisation
- Universel : s'adapte à quasiment tous les flacons avec un embout
- Application rapide du liquide dans l'œil avec moins de perte de produit
- Diminution du réflexe de clignement des yeux
- Sans douleur
- Beaucoup plus facile d'administrer les gouttes aux enfants
- Diminue l'appréhension quant à l'arrivée du produit dans l'œil
- Plus de risque de traumatismes oculaires avec le flacon de produit

Dimensions :

Les deux couleurs font la même dimension : 4.2 x 3 cm

Coloris disponibles :

- Bleu
- Rouge

Instructions :

1. Lavez l'applicateur EziDrops avant chaque utilisation.
2. Retournez EziDrops et placez la buse du flacon dans le haut de l'applicateur.
3. Soulevez maintenant le flacon et l'applicateur sur l'œil tout en inclinant la tête vers l'arrière, en regardant le plafond.
4. Une fois que votre tête est aussi loin en arrière et que EziDrops est aussi plat que possible, pressez le flacon pour libérer une goutte.
5. Essayez tout excès de liquide avec un mouchoir en papier

Fabriqué au Royaume-Uni