

Bandelettes test urinaire de dépistage de Thc

Tests urinaire en bandelettes pour la détection de THC.

Met en évidence les drogues par interprétation visuelle de l'apparition d'une couleur sur la bandelette.

Simple d'utilisation :

- Retirer la bandelette de son étui et la tremper dans l'échantillon d'urine au moins 10 à 15 secondes.
- Sortir la bandelette, démarrer le minuteur et attendre que la bande colorée apparaisse.
- Le résultat doit être lu dans les 5 minute.

Conditionné sous emballage individuel.
Vendu par lot de 10 tests.

