

## FICHE TECHNIQUE

### Bâtonnets de soin de bouche à usage unique - Conditionnement individuel - Boîte de 100

Applicateur avec tête en mousse pour les soins buccaux - Non stérile - A usage unique

Constitués d'une tige plastique avec un embout éponge en mousse. Ces bâtonnets permettent l'application des solutions de soins buccales pour l'hygiène bucco-dentaire. L'embout éponge est peu absorbant.

Ces bâtonnets de soins buccaux neutres sont **non stériles** et à **usage unique**.

- Non stériles
- À usage unique
- Applicateur éponge en mousse (absorption faible)
- Tête en forme d'étoiles permettant le soin des gencives et de la dentition
- Tige ronde en plastique
- Couleur de l'éponge : Verte

#### Utilisation :

Porter des gants et ouvrir l'emballage

Vérifier que le bâtonnet est intact et que l'éponge est bien fixée au bâton

Après utilisation : Vérifier que le bâtonnet est intact et que la mousse n'est pas restée dans la bouche

Penser à vérifier que la cavité buccale est propre et dégagée

#### Dimensions :

Longueur totale : 15,5 cm

Longueur de la tige visible : 13,2 cm

Diamètre de la tête éponge : 2 x 1,8 cm

-----

Dispositifs médicaux à usage unique - Ne pas réutiliser

Dispositif médical conforme aux normes européennes

Conserver au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

