

### Curettes auriculaires articulées avec loupe et lumière Lighted Articulating -Boîte de 25- BIONIX

Embout plein et ovale, utilisé pour les canaux auriculaires très étroits

La Lighted Ear Curette de Bionix® Lighted Articulating combine un éclairage intégré avec un dispositif de grossissement pour faciliter la visualisation et l'élimination sécurisée et efficace du cérumen du conduit auditif, permettant ainsi aux praticiens de réaliser l'examen plus rapidement.

La loupe et la source lumineuse peuvent être réutilisées plusieurs fois, ce qui contribue à une utilisation plus durable des équipements médicaux.



#### Caractéristiques :

- Embout articulé à 90°
- Longueur : 12 cm
- Matière : plastique
- Usage unique
- Éclairage LED
- Idéal pour une vue moins obstruée

#### Contenu du set :

- 25 curettes articulées de taille identique
- 1 lentille grossissante
- 1 source lumineuse

#### Conditionnement :

- Boîte de 25 curettes articulées

#### Mode d'emploi :

Assemblage/démontage :

1. Pour assembler la lighted ear curette, introduisez l'extrémité de la curette dans la source lumineuse en alignant les chevilles qui se trouvent à l'extrémité de la curette sur les rainures à l'intérieur de la source lumineuse.

Appuyez et tournez fermement dans le sens horaire jusqu'à ce que la rotation s'arrête.

Cela aura pour effet de verrouiller la curette en position et d'activer la lumière. Pour fixer la lentille de grossissement, clippez la lentille sur le col de la source lumineuse de sorte que le haut de la lentille soit orienté vers l'embout de la curette auditive.

2. Pour le démontage, appuyez sur la curette et faites-la tourner dans le sens anti-horaire pour la retirer de la source lumineuse.

La lumière s'éteint une fois la curette retirée.

Matériel Médical CE de classe I

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*