



### Détergent désinfectant Bidon 5L Medfill - Stericid

Pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux.

#### **Caractéristiques :**

Nettoyage et désinfectant des :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, machines à laver, etc.)

#### **Formule :**

- Sans parfum
- Actif : Chlorure de Didécyl diméthylammonium

#### **Utilisation :**

- Répartir généreusement le produit sur la surface à nettoyer et désinfecter en s'assurant que la surface est bien mouillée.
- Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m<sup>2</sup>).
- Laisser agir 5 min.
- Ne pas rincer.

Produit destiné au professionnels.

#### **Précautions d'emploi :**

Aucun pictogramme de danger

En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

#### **Propriétés microbiologiques :**

- Bactéricide : EN1276\*, EN13727\*\*, EN13697\*\* en 5 min.
- Levuricide : EN1650\*, EN13624\*\*, EN13697\*\* en 5 min.

Actif sur virus : EN14476\*\* sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus  
EN16777\*\* sur Vaccinia, Norovirus, Adenovirus en 5 min.

- \*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton.
- \*\*3g/L albumine bovine.

Fabrication Française.