

## FICHE TECHNIQUE



### Fauteuil releveur mono-moteur XXL - Brun - Egvar

Fauteuil releveur mono-moteur XXL - Brun - Confort et praticité - Poids maximum 200 kg

Le fauteuil releveur mono-moteur XXL brun allie confort et praticité. Il est revêtu d'un tissu molleton, ce qui garantit une assise douce et agréable, mais aussi une durabilité du produit. La densité de la mousse assure un soutien optimal à son utilisateur. Avec son **assise XXL**, il a une capacité de poids maximal de 200 kg.

Ses diverses fonctionnalités intuitives permettent d'alterner les positions au besoin. La télécommande intuitive permet de régler la position du dossier et du repose-pieds en deux étapes simples. Pour répondre aux différents besoins de l'utilisateur, il offre une inclinaison de 155-160°, ce qui le rend **idéal pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés motrices**. Sa fonction "relevage" permet à son utilisateur de se lever sans difficultés.

**Matériau :** Tissu molleton 250g

**Densité de la mousse :** 28g/m<sup>2</sup>

**Poids maximal supporté :** 200 kg

#### Dimensions :

Hauteur : 102 cm  
Profondeur totale : 92 cm  
Dimension totalement allongé : 158 cm  
Dimension assise jambes dépliées : 107 cm  
Dimension assise jambes pliées : 85 cm  
Hauteur d'assise : 48 cm  
Profondeur d'assise : 54 cm  
Largeur d'assise : 65 cm  
Hauteur d'accoudoir : 64 cm

**Poids du fauteuil :** 46 kg

**Modèle du moteur :** BOAN motor 375-198

**Tension du moteur :** 29V

**Degré d'inclinaison :** 155-160°

**Garantie :** 2 ans

**Couleur :** Brun

#### Positions du fauteuil :

- Allongé
- Assis
- Relevé

#### Éléments du fauteuil :

- Dossier
- Assise
- Coussin droit
- Coussin gauche
- Prise
- Transformateur

- Télécommande
- Supports d'équilibrage x2

**Utilisation :**

Inclinaison du dossier et relever le repose-pieds : Utiliser la télécommande en maintenant le bouton matérialisant le fauteuil en position allongée, afin d'incliner le dossier et relever le repose-pieds. Adapter la position aux besoins.

Retour à la position initiale assise : Utiliser la télécommande en maintenant le bouton matérialisant le fauteuil en position assise.

Utilisation de la fonction "relevage" : Maintenir le bouton matérialisant le fauteuil en position assise jusqu'à obtenir une position permettant de se lever sans efforts. Pour un retour à la position initiale, maintenir le bouton matérialisant le fauteuil allongé.