



Gel génital - Prévention et traitement des condylomes génitaux causés par le Hpv - Papilocare®

Traitement coadjuvant des condylomes génitaux externes provoqués par le papillomavirus

Gel non hormonal hydratant et réépithélisant de la zone génitale externe.

Son utilisation est indiquée pour hydrater et réparer la muqueuse génitale lorsqu'elle nécessite des soins particuliers, après certains traitements médico-chirurgicaux (par exemple, laser pour l'élimination des condylomes génitaux ou des verrues produites par le HPV).

Conditionnement : tube de 30 ml

- Aide à l'élimination des condylomes et à la prévention des récurrences
- Contribue à la réparation des tissus après traitements médico-chirurgicaux
- Hydrate et réépithélise
- Respecte le tissu sain
- Non hormonal
- Sans parabens
- Sans parfum
- Sans cytotoxicité
- pH = 5

Composition :

- Acide hyaluronique : action hydratante et apporte élasticité à la muqueuse vaginale
- β -glucane : anti-oxydant et anti-inflammatoire pour maintenir la structure et la fonction de la muqueuse vaginale
- Centella asiatica: réparateur, régénérateur et cicatrisant. Stimule la production de collagène
- Aloe Vera : apaisant, cette plante possède une action antiseptique et épithélisante
- Coriolus Versicolor : possède une action réépithélisante sur les lésions et les microlésions cervico-vaginales
- BioEcolia®: alfa-oligoglucane qui stimule la croissance de la flore bactérienne bénéfique et rééquilibre le microbiote de la zone génitale
- Neem (ou margousier) : possède un effet cicatrisant

Utilisation :

Appliquer avec le bout des doigts dans la région génitale externe. Deux applications quotidiennes sont recommandées dont l'une préféablement le soir, avant le coucher. Chez les femmes, il peut être utilisé conjointement avec le gel vaginal Papilocare.

Dispositif médical de classe I

Ce dispositif médical est un produit de santé avec le marquage CE.

Compatible avec l'usage de préservatifs.

Produits fabriqués en Espagne

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des ingrédients.
L'utilisation peut provoquer dans certains cas isolés des démangeaisons ou des irritations au niveau de la zone d'application.

Si vous ressentez un quelconque désagrément à la suite de l'application,
arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin.
En cas de grossesse, consultez votre médecin avant utilisation.