



### Kit complet Ellune - Électrostimulation règles douloureuses - endométriose

Dispositif d'électrostimulation pour soulager les règles douloureuses et l'endométriose

Inédit, joli et discret, le dispositif Ellune est spécialement conçu pour les femmes afin de soulager rapidement les règles douloureuses dès qu'elles commencent. Ce dispositif aide également à soulager l'endométriose (diminution significative de la douleur).

#### Compris dans le kit :

- 2 électrodes Ellune filaires
- 1 câble de connexion entre les électrodes et l'appareil
- 1 boîtier Ellune
- 1 skin (coque) lavande
- 1 skin blanche
- 1 câble de charge USB
- 3 mois de gels pads
- 1 pochon de transport
- 1 manuel d'utilisation

Léger, petit et compact, l'appareil peut être transporté partout et reste très discret une fois placé.

Soulage les douleurs du bas du dos et du bas du ventre.

#### Comment l'utiliser ?

1. Attacher à la taille en utilisant le clip situé à l'arrière de l'appareil.
2. Allumer le dispositif Ellune.
3. Placer les électrodes à l'endroit où la douleur est ressentie (au bas du ventre ou du dos).
4. Choisir un niveau d'intensité qui vous convient (il y a 35 intensités possibles).
5. Pour éviter de changer accidentellement l'intensité, appuyer sur le bouton "verrouiller" pour activer le mode de verrouillage.

*Si le dispositif Ellune détecte une erreur de connexion, il interrompra la thérapie et affichera un symbole d'erreur de connexion sur l'écran. Pour résoudre une erreur de connexion, vérifier que les électrodes sont fermement appliquées et que le câble de connexion est correctement branché.*

#### Dimensions :

Boîtier Ellune : 6.76 cm x 4.12 cm

#### Poids :

37gr

#### Charge :

Se recharge par batterie (charge complète en 3 heures).  
Autonomie de 20 heures en continu sur le niveau le plus élevé.

Les électrodes collent à votre peau grâce aux gels pads. Il est conseillé de remplacer ces pads à chaque cycle menstruel, pour s'assurer qu'ils collent toujours bien et éviter ainsi une possible irritation de la peau.

Recommandé par les gynécologues.

**Important** - contre-indication :

Ellune ne peut pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque ou souffrant de tout autre trouble cardiaque ou un autre dispositif électronique implanté.

Ellune ne peut pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que par des enfants de moins de 15 ans.

Matériel Médical CE - Classe 2a