

FICHE TECHNIQUE



Nettoyant désinfectant toutes surfaces et milieu médical - EN 14476 Robemed- 750ml

Virucide, bactéricide, fongicide, sans javel. (Virus enveloppé lipidique : coronavirus, influenza, hépatite B et hépatite C)

Produit biocide pour le nettoyage et la désinfection au quotidien de toutes surfaces, y compris les surfaces extérieures de dispositifs médicaux non critiques tels que mobiliers, tables, divans, gueris, matériels de diagnostic.

Élimine 99.9% des bactéries et virus. Sans alcool.

- Effet détergent puissant et anti-tâche
- Propriétés microbiologiques : virucide, bactéricide et fongicide
- Non corrosif sur plastiques, métaux et selleries
- Sans odeur
- Ne laisse pas de traces
- Agent tensioactif
- Léger effet moussant
- Efficace sur les traces de doigt
- Désincruste en profondeur

Propriétés microbiologiques :

- Virucide selon **EN14476 - Virus enveloppés: Coronavirus**, Influenza (grippe), Hépatite B et Hépatite C
- Bactéricide selon **EN1276, EN13697**- en condition de saleté: Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurim.
- Fongicide selon **EN1650** : Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.

Bactéricide : EN1276 - en conditions de saleté : **5 min**

Bactéricide : EN13697 - en conditions de saleté : **5 min**

Fongicide : EN1650 - en conditions de saleté : **15 min**

Virucide : EN14476 - en conditions de saleté - virus d'une enveloppe lipidique : **1 min**

Agent désinfectant :

Chlorure de didécyl diméthyl ammonium : 0,30% (CAS n°7173-51-5)

Produit fabriqué en Europe

Utilisation :

Par pulvérisation à 20 cm des surfaces et des équipements, textiles exclus.

Nettoyer avec un chiffon propre et humide.

Ne pas rincer, sauf pour les surfaces en contact avec les aliments ou les animaux, après

Précautions :

Ce produit n'est pas destiné à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

À quoi correspondent les indications TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 et TP18 ?

TP1 : Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.

TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique.

TP3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.

TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments.

TP5 : Désinfectants pour eaux de boisson.

TP18 : Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.

Fabriqué en europe.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informa