

Solvant Leukotape pour décoller les masses adhésives - 350 ml - Bsn Médical

Pour retirer facilement les résidus de colle.

Solution incolore, ne tache pas. Permet de retirer les bandes adhésives sans douleur. Flacon de 350 ml.

- Produit incolore.
- Ne laisse pas de taches.
- Retire les dépôts de colle des bandes adhésives.
- Facilite la pose des bandes de contensions adhésives.

Mode d'emploi :

- Pour retirer plus facilement la bande, humidifier complètement le support avec le solvant Leukotape.
- Décoller, découper et enlever progressivement le support.
- Humidifier une nouvelle fois le support, et si besoin, au fur et à mesure du retrait.
- Utiliser une compresse imprégnée de solvant pour enlever les résidus.
- Après décollement du support, s'assurer qu'il ne reste plus de produit sur la peau du patient.
- Poser le nouveau support sur une peau sèche et propre.

Contenance : 350 ml.

Composition : méthylal (diméthoxyméthane), éthanol, PPG-2 méthyl éther (dipropylène glycol méthyl éther), MIBK (4-méthylpentane-2-one ou méthylisobutylcétone), eau et glycérine.

Fabrication européenne.

