

## FICHE TECHNIQUE

### Test de grossesse Biosynex Simply fiable 99%

Détection de l'hormone Hcg en 3 minutes

Pour une information de votre état de grossesse dès le lendemain de la date présumée de vos menstruations.



#### Utilisation :

- Positionner l'embout du test de grossesse sous votre jet d'urine ou le tremper au moins 15 secondes dans un échantillon d'urine recueilli dans un récipient propre.
- Replacer le capuchon sur l'embout, poser le test.
- Le résultat doit être lu après 3 minutes
- Lecture du résultat : 2 lignes enceinte, 1 ligne pas enceinte.
- Ne pas lire les résultats au-delà de 10 minutes.
- Utiliser de préférence avec la première urine du matin.

Dimension boîte : 14x2 cm.

Conserver au sec et à l'abri de la lumière, entre 2° et 30°C.

Usage unique.

Conditionné dans pochette en aluminium.

Matériel médical CE.

***Un diagnostic confirmé de grossesse ne doit être posé que par un médecin après évaluation des résultats cliniques et de laboratoire***