

Connexion Accu-Chek® Guide à l'application *Gluci-Chek*



1 Activez la fonction **bluetooth** sur votre smartphone.



2 Dans l'app Gluci-Chek, sélectionnez l'option **connexion** dans le menu et sélectionnez « **connecter un lecteur** ».



3 Authentifiez-vous via **Accu-Chek® Smart Pix Online** afin de partager vos données. Si vous n'avez pas encore de compte Accu-Chek® Smart Pix Online, renseignez-vous auprès de votre professionnel de santé.



4 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application.



5 Allumez le lecteur. Allez dans le menu « **Réglages** ».



7 Sélectionnez « **Liaison** », liez le dispositif en sélectionnant « **Oui** ».

ACCUCHEK® Guide



6 Sélectionnez « **Sans fil** ».



8 Insérez dans votre smartphone, le **code à 6 chiffres** qui apparaît sur votre lecteur. La connexion est établie

ACCUCHEK® Guide

Roche

Accu-Chek® Guide
Donnez un coup de pouce à votre quotidien



ACCUCHEK®

Comment bien faire un test de glycémie


ACCU-CHEK® Guide



1 Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon. Rincez-les bien et séchez-les soigneusement avec une serviette propre.




2 Vérifiez la date de péremption sur la boîte de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.

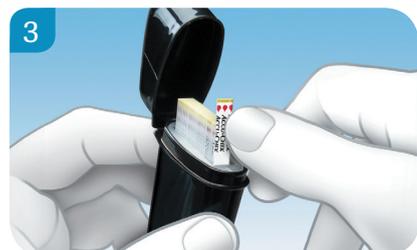

3 Poussez une bandelette vers le haut en exerçant une légère pression **avec le pouce** et retirez-la de la boîte. Puis refermez soigneusement le couvercle.



4 Insérez la bandelette dans le lecteur en respectant le sens indiqué par la flèche. Le lecteur s'allume alors automatiquement.

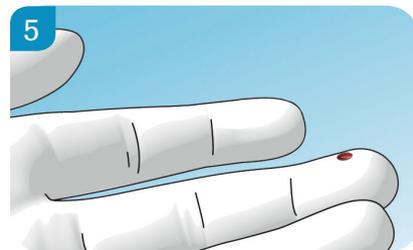

5 Utilisez toujours une petite goutte de sang frais bien formée. Ne laissez pas la goutte s'étaler sur le doigt.



6 Mettez celle-ci en contact avec l'extrémité jaune de la bandelette. Enlevez votre doigt de la zone dès que le message **Mesure en cours** s'affiche à l'écran.



7 Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 4 secondes⁽¹⁾.



8 Appuyez sur cette touche pour éjecter la bandelette du lecteur. Appuyez sur la touche **OK** pendant 3 secondes ou attendez 15 secondes pour que le lecteur s'éteigne.

Seule une manipulation conforme du lecteur conduit à des résultats de glycémie exacts, qui permettent des décisions thérapeutiques adaptées. Par conséquent, respectez rigoureusement ces instructions.

(1) Notice d'utilisation des bandelettes Accu-Chek® Guide - Avril 2017.



Accu-Chek® Guide

Donnez un coup de pouce à votre quotidien

06/2019. Le set d'autosurveillance de la glycémie Accu-Chek® Guide est un dispositif d'Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ce set composé de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de dispositifs médicaux est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L'ASG est employée lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. FR-972 - Réf. 09003193001 - 1906ROCHEDCGP003

Assistance ACCU-CHEK®

0800 27 26 93 Service & appel gratuits



Agissez pour le recyclage des papiers avec Ecofolio.

Experience what's possible*.

* Découvrez un monde de possibilités.

ACCU-CHEK®, ACCU-CHEK® GUIDE sont des marques déposées de Roche. © 2019 Roche Diabetes Care France

www.accu-chek.fr
Roche Diabetes Care France
2, avenue du Vercors - 38240 Meylan



ACCU-CHEK®