



# WIP'ANIOS CLEAN'UP + SPOR'ACTIV



## INDICATIONS

Solution moussante sporicide pour la désinfection des dispositifs médicaux thermosensibles non immergeables, ou immergeables sans canal (ex. sondes ...).


WIP'ANIOS SPOR'ACTIV s'utilise exclusivement avec WIP'ANIOS CLEAN'UP

## PROTOCOLE D'UTILISATION\*

### ETAPE 1 : Nettoyage



- Mettre des gants à usage unique.
- Prendre une lingette WIP'ANIOS CLEAN'UP.

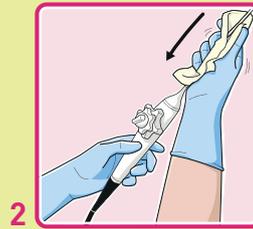


- Essuyer le dispositif médical du propre au sale : de la prise vers l'extrémité.
- Jeter la lingette et les gants.


### ETAPE 2 : Désinfection de haut niveau




- Mettre de nouveaux gants.
- Prendre une autre lingette Wip'anios Clean'up.
- Appliquer une dose de Wip'anios Spor'activ (1 pression de pompe).

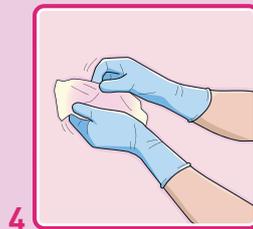


- Répartir la mousse sur l'ensemble de la lingette en pliant sur elle-même.
- La froisser jusqu'à obtenir une coloration rose uniforme.
- La lingette est prête pour la désinfection

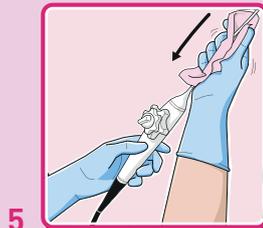

- Essuyer le dispositif médical de la prise vers la poignée et descendre jusqu'à l'extrémité.
- S'assurer que toutes les zones du dispositif médical ont été en contact avec la lingette.
- Jeter la lingette.
- **Respecter le temps de contact de 3 minutes.**

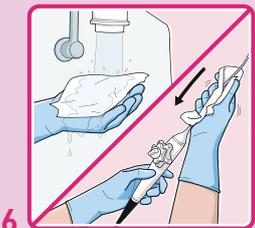

- Rincer abondamment le dispositif médical à l'eau bactériologiquement maîtrisée à l'aide d'une compresse pour retirer l'excédent de désinfectant\*\*.

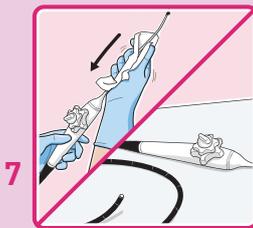

- Sécher en essuyant avec une nouvelle compresse.
- Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible ou suivre le protocole interne de l'établissement.

\*Se conformer aux recommandations de l'établissement pour les dispositifs médicaux nécessitant l'usage de gaine de protection

\*\*La qualité d'eau et le type de compresse doit être adaptée au niveau de criticité du dispositif médical traité

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

FR2815-180416-Photos non contactuelles